

Návod na použitie**FONENDOSKOP OBOJSTRANNÝ**

- HS-30B – pre dospelých štandard
- HS-30B1 – pre dospelých vo farbe
- HS-30F – pre deti štandard
- HS-30F1 – pre deti vo farbe
- HS-30H – pre deti deluxe antikoro
- HS-30J – pre dospelých deluxe antikoro
- HS-30K – pre dospelých kardiológ
- HS-30L – pre dospelých deluxe
- HS-30M – pre deti deluxe
- HS-30R1 – pre novorodencov
- HS-30R2 – pre novorodencov antikoro
- HS-30S – binaurálny

Certifikát č.: 44097/101/1/2003

SKTC -101

CE

FUNKCIA

Fonendoskop obojstranný je jeden z prístrojov pre posluchové vyšetrenie organizmu priamou metódou. Taktiež sa používa pri meraní krvného tlaku ako posluchová pomôcka.

NÁVOD NA POUŽITIE

Po vybratí prístroja z puzdra sa presvedčte, či je hadička pevne pripojená k membráne a lýre. Týmto je fonendoskop pripravený k používaniu.

POSTUP PRI POUŽÍVANÍ

Lýru fonendoskopu si založíte ušnicami do zvukovodov uší a membránu priložíte na tú časť tela pacienta ktorú chcete počúvať. Pri počúvaní s opačnou stranou otočte zvukovodnú trubičku na príslušnú stranu. Pri použití s tlakomerom dodržiavajte postup uvedený v návode tlakomera.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Počúvacia plocha na membráne je obojstranná.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záručná doba na fonendoskop je 24 mesiacov odo dňa predaja. Záruka sa vzťahuje iba na skryté chyby a poškodenia zjavne nezavinené kupujúcim. V záručnej dobe Vám bude prístroj opravený alebo vymenený bezplatne. Prístroj treba zasielať na opravu vždy iba s riadne vyplneným záručným listom. Po záručnej dobe Vám prístroj bude opravený podľa cenníka opráv a náhradných dielcov, ktorý Vám na požiadanie zašleme.

SERVIS

V prípade akejkoľvek poruchy fonendoskopu, vyplňte na internetovej adrese www.jares.sk/zdravotnictvo v sekcii „SERVIS“ servisný formulár a odošlite ho. Obratom Vás budeme kontaktovať. Vyplnenie servisného formulára nie je podmienkou záručnej opravy.

ZÁZNAMY O OPRAVÁCH

Dátum opravy	Popis chyby	Záruka Áno / Nie	Spôsob odstránenia
Meno a podpis			
Meno a podpis			
Meno a podpis			